





Kuvassa MiniMed™ 670G -pumppu



ASCENSIA
Diabetes Care

Medtronic

Langattoman yhteyden asennusohjeet

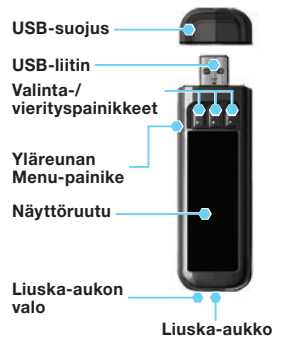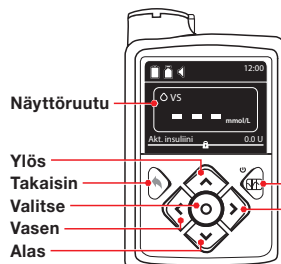

HUOMAA: Tarkista mittarisi mittayksiköt.
Katso tarkemmat ohjeet mittarin käyttöoppaasta.

CONTOUR®NEXT LINK 2.4 -mittarin yhdistäminen MiniMed™ 670G -insuliinipumppuun

Mittarin lataaminen

1 Irrota USB-suojaus, jolloin USB-liitin paljastuu.



CONTOUR NEXT LINK 2.4 -mittarissa on pysyvä ladattava akku. Lataa mittari verkkolaturilla tai kytkemällä USB-liitin tietokoneeseen. Varmista, että tietokone on päällä. Mittarissa näkyy lyhyen aikaa teksti "Älä mittaa-Lataus käynnissä" ja liuska-aukon valo vilkkuu. **Et voi mitata verengluukoosia, kun akku latautuu.** Kun lataus on valmis, liuska-aukon valo sammuu. Irrota CONTOUR NEXT LINK 2.4 -mittari verensokerin mittaamista varten.

Irrota mittari latauslaitteesta ennen kuin aloitat asetusten määrittämisen

2 Aloita asetukset pitämällä Menu-painiketta alaspainettuna useiden sekuntien ajan, kunnes mittari käynnistyy.




3 Valitse kieli vierittämällä listaa alaspäin. Paina OK.




4 Paina OK-painiketta, kun näytöllä on oikea kieli. Jos näytössä näkyy väärä kieli, paina NO-painiketta.

Yhdistä pumppuun

5 Haluatko yhdistää MiniMed-pumppuun? Paina OK.

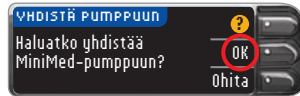

6 Paina OK. Aseta mittari sivuun ja ota esiin pumppu.

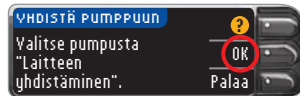

7 Paina Valitse-painiketta. Selaa kohtaan Vaihtoehdot alaspäin osoittavan nuolen avulla. Paina Valitse-painiketta.



Jos pumpun näyttö sammuu, voit herättää sen painamalla mitä tahansa painiketta.

8 Selaa kohtaan Apuohjelmat alaspäin osoittavaa nuolta painamalla.

Paina Valitse-painiketta. Käytä alaspäin osoittavaa Nuolipainiketta. Apuohjelmat-valikossa ja selaa kohtaan Laitevaihtoehdot. Paina Valitse-painiketta.




9 Selaa kohtaan Laitteen yhdistäminen Laitevaihtoehdot-näytössä. Paina Valitse-painiketta.



10 Aseta mittari ja pumppu vierekkäin. Valitse pumpusta Automaattinen yhteys.



Valitse mittarista Yhd. autom.

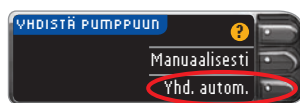

11 Lue pumpun näytössä näkyvä teksti. Siirry seuraavalle sivulle alaspäin osoittavan nuolipainikkeen avulla.

Selaa kohtaan Jatka nuolipainikkeen avulla. Paina Valitse-painiketta.




12 Aseta mittari ja pumppu vierekkäin. Valitse pumpusta Etsi.

Valitse mittarista Etsi.

Haku voi kestää kaksi minuuttia.



13 Tarkista vastaako pumpun näytössä näkyvä laitteen SN (sarjanumero) mittarin näytössä näkyvää laitteen sarjanumeroa. Jos ne vastaavat toisiaan, selaa pumpun kohtaan Vahvista. Paina Valitse-painiketta.

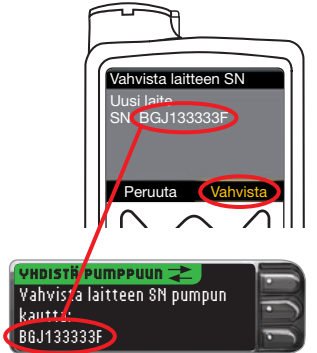


Kun pumppu yhdistyy mittariin, mittarin näytössä näkyvä SN (sarjanumero) muuttuu eri sarjanumeroksi. Tämä numero on pumpun sarjanumero.


14 Katso pumpun takakanta. Tarkista, että pumpun takakannessa oleva SN vastaa mittarin näytössä nyt näkyvää pumpun sarjanumeroa. Paina Seuraava.




15 Valitse Aina ja paina OK seuraavassa näytössä.

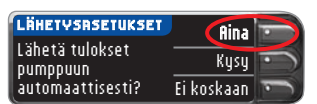


16 Valitse Pvm Esitysmuoto.

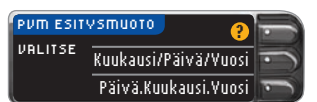

17 Paina OK. Huomaa: Mikäli päivämäärä ja kellonaika ovat väärin, ne täytyy vaihtaa pumpusta käsin.

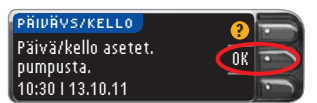

18 Valitse Hyväksy -painikkeella AutoLog ei käytössä. AutoLog-toiminnon avulla merkitään mittaustulos saaduksi paaston aikana, ennen ateriaa tai aterian jälkeen. Katso käyttöoppaasta lisätietoja.

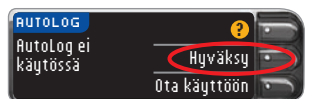

Ohjeet asetusten valmiiksi suorittamiselle jatkuvat seuraavalla sivulla. ➡

19 Hyväksy tai Muuta huomautukset korkeasta ja matalasta verensokerista.

Mittari huomauttaa äänimerkillä, kun verensokeripitoisuutesi on yli tai alle asettamasi tason.




20 Hyväksy tai Muuta tavoitealueuttasi.

Tavoitealue on verensokerin mittaustuloksille asettamasi tavoite.



HUOMAA: Huomautuksia voi asettaa vain valittujen tavoitealueiden ulkopuolelle. Tavoitteet voidaan asettaa vain valittujen huomautusrajojen sisälle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Alta löytyy asiakaspalvelun yhteystiedot.

21 Järjestelmän asetukset ovat nyt valmiit verensokerin mittauksen suorittamiseen.

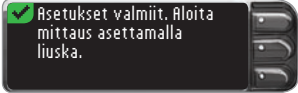

Katso tarkemmat ohjeet CONTOUR NEXT LINK 2.4 -mittarin käyttöoppaasta, pistolaitteen pakkausselosteesta ja MiniMed-insuliinipumpun käyttöoppaasta.

Ascensia Diabetes Care asiakaspalvelu vastaa numerossa 0800 172 227
Katso asiakaspalvelun palveluajat verkkosivulta www.diabetes.ascensia.com

IVD In vitro -diagnostiseen käyttöön

Jakelija Suomessa:
Ascensia Diabetes Care Finland Oy
Hiilikatu 3
00180 Helsinki
Suomi
Asiakaspalvelu: 0800 172 227
Tilaukset: 09 7479 0393
Fax: 09 8565 7310
diabetes.2@ascensia.com

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland


0088

 **ASCENSIA**
Diabetes Care

Medtronic

Katso patentteja ja niihin liittyviä lisenssejä koskevia tietoja verkkosivustolta: www.patents.ascensia.com

Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logo, Clinilog, Contour, Glucofacts ja No Coding (ei koodausta) -logo ovat Ascensia Diabetes Care Holdings AG -yhtiön tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Medtronic, Medtronic-logo ja MiniMed ovat Medtronicin tavaramerkkejä.
© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kaikki oikeudet pidätetään.